



## Installationshilfe DosiNet (Version 1.5.0)

Stand: Juli 2020

Entsprechend Ihrer Anmeldung haben wir Ihnen zu Ihrem Benutzernamen ein **Passwort** zum Download der Installationsroutine vergeben.

Für die Installation können wir Ihnen und Ihrer IT-/Netzwerk-Abteilung folgende Eckdaten liefern:

Die Installation muss direkt von unserer WEB-Seite auf den PC des Nutzers erfolgen.

**Download:** .exe – Installationsprogramm (install4j) (32 Bit oder 64 Bit-Version)

**Programm:** Client-Java-Applikation

**Installationsort default 32 Bit:** C:\Program Files (x86)\DosiNet

**Installationsort default 64 Bit:** C:\Program Files\DosiNet

Admin-Rechte nötig, damit in C:\Program Files bzw C:\Program Files (x86) installiert werden kann.

**Logfile, localProperties:** User des im Windows angemeldeten Users.

Das Verzeichnis wird aktualisiert und bei nicht vorhanden sein, neu angelegt.

Die Daten kommen immer aktuell aus der DB. (Ihre Daten – unsere Datenbank)

Die Java-Umgebung (Java 1.8.0\_202) wird im Installationsverzeichnis mitgeliefert, somit unabhängig von aktuell kundenseitig installiertem Java.

Die Kommunikation zwischen DosiNet und STRADOS2 (= unsere Verwaltungsdatenbank) erfolgt über das **Protokoll HTTPS**, einer verschlüsselten Verbindung auf dem Standard-Port 443.

Das reine Auswählen des Punktes „System-Proxy“ in den Einstellungen reicht üblicherweise aus um Ihre (etwaigen) Proxy-Einstellungen zu setzen.

Eventuell ist es in Ihren Systemeinstellungen (Proxy-Server) auch notwendig den DosiNet Servernamen und/oder die IP Adresse zu hinterlegen:

**DosiNet 1.5.0:**

**Servername:** dosinet.mirion.com

**IP:** 62.245.168.164



## MacOS:

Bei Installationen unter MacOS Betriebssystemen ist eine Besonderheit in den Einstellungen zu beachten:

Die standardmäßige Einstellung verhindert das Speichern des DosiNet-Paketes, da es nicht aus dem App Store kommt.

Bitte ändern Sie deswegen die Standardeinstellung auf „Keine Einschränkungen“. (s. Grafik unten)



Englische Version:

Bitte ändern Sie die Standardeinstellung auf „Anywhere“.

System Preferences -> Security & Privacy -> General -> Allow apps downloaded from: **Anywhere**

Weitere Hilfestellungen zur Installation und Handhabung von DosiNet erhalten Sie im Bedarfsfall durch unseren Onlineservice.

Ihr Dosimetrieservice